


# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МИКРОДВИГАТЕЛИ

Более подробную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации инструментов и приборов - [www.bienair.com](http://www.bienair.com)


## СТЕРИЛИЗАЦИЯ

### В АВТОКЛАВЕ КЛАССА В

рекомендуем MELAquick или Vacuklav  
фирмы MELAG

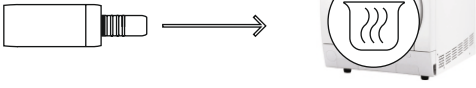


### СМАЗКА С ПОМОЩЬЮ LUBRIFLUID

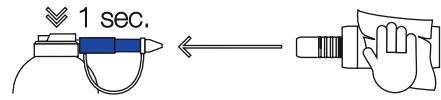

### ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ


рекомендуем MELAtherm 10  
фирмы MELAG

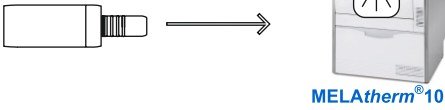


### РУЧНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ




### ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА

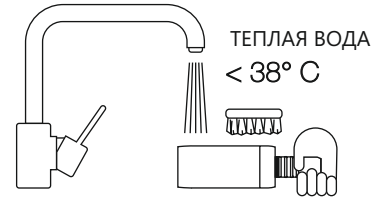

### ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА AQUACARE

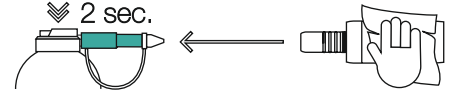

### ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА SPRAYNET

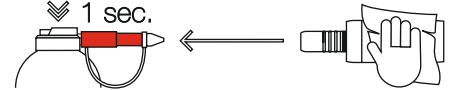

### НАРУЖНАЯ ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА SPRAYNET




## С УГОЛЬНЫМИ ЩЕТКАМИ

НЕ стерилизуемые микродвигатели

только кожу





### ПОДГОТОВКА

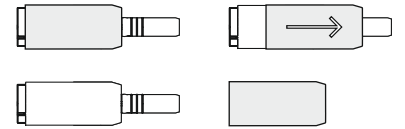


Снятие кожу. У моторов серии MC2 (IR) и MC2 GTAV, кожу для стерилизации отсутствует. Пожалуйста, смотрите руководство по эксплуатации, в ней вы найдете более подробную информацию.

## ХИРУРГИЧЕСКИЕ

### ПОДГОТОВКА

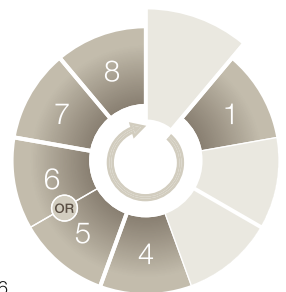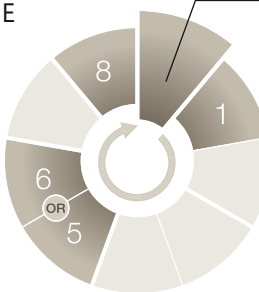

## БЕЗЩЕТОЧНЫЙ

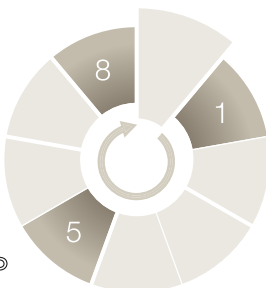

СМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПО УХОДУ НА ОБОРОТЕ (НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ)

# СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА МИКРОМОТОРАМИ BIEN AIR



## Aquacare

500 мл чистящее средство в виде спрея, в уп. 6 шт. для очистки инструментов, используемых с физиологическим раствором  
**арт. 1600617-001**



## Spraynet

500 мл чистящее средство в виде спрея, в уп. 6 шт. для очистки инструментов и приборов  
**арт. 1600036-001**



## Lubrifiuid

500 мл смазочное средство в виде спрея, в уп. 6 шт. для турбин, механических наконечников и моторов серии MX, Basch и Aquilon.  
**арт. 1600064-001**



## Чистящая игла

Для прочистки каналов распылителей турбин, угловых и прямых наконечников. Идет в комплекте с каждым наконечником. Так же можно приобрести отдельно, в уп. 10 шт  
**арт. 1000001-010**